

راهنمای رفع خطاهای یونیت دندانپزشکی (E1-E5)

کد خطا	معنی	اقدام سریع
E1	فشار آب پایین	- فشار آب ورودی کلینیک را بررسی کنید. - اتصالات شلنگ‌های آب و فیلترهای آب را بازبینی و تمیز نمایید. - در صورت نیاز، فیلتر آب را تعویض کنید.
E2	نوسان برق یا خطای پاور	- بررسی اتصال کابل‌های موتور به برد کنترل یونیت - خاموش و روشن کردن دستگاه برای ریست سیستم - در صورت تداوم خطا، بررسی سلامت موتور صندلی یا تعویض آن
E3	مشکل در سیستم هوا یا ساکشن	- فشار کمپرسور هوا را بررسی کنید. - تمیزی فیلتر هوای یونیت را کنترل نمایید. - شلنگ‌های ساکشن را از نظر انسداد بازبینی کنید.
E4	خرابی سنسور فشار یا حرارت	- سنسور فشار آب و هوا را تمیز یا در صورت لزوم تعویض نمایید. - بررسی سیم‌کشی‌های سنسور به برد کنترلی
E5	خطا در منبع تغذیه یا ارتباط برد	- بررسی ولتاژ خروجی منبع تغذیه - تست برد اصلی و تعویض در صورت نیاز - در این خطا توصیه می‌شود دستگاه توسط تکنسین متخصص بررسی شود.

