

چک لیست سریع عیب یابی و هزینه تخمینی تعمیر ساکشن یونیت دندانپزشکی



نسخه کاربردی ویژه کلینیک های دندانپزشکی ایران - سال ۱۴۰۳

خطای ساکشن 🔍	دلیل احتمالی ⚙️	اقدام پیشنهادی 🩺
مکش بسیار ضعیف یا صفر	انسداد فیلتر یا شیلنگ	شست و شو یا تعویض فیلتر
صدای غیرعادی / ویبره	خرابی موتور خلأ / پمپ	تست و تعویض موتور
عدم عملکرد کامل	خرابی برد / کلید فرمان	تست برد / تعویض قطعه
مکش ناپایدار	نشتی اورینگ یا اتصال	محکم سازی / تعویض اورینگ
افت مکش در ساعات شلوغ	ظرفیت پایین نسبت به یونیت ها	نصب ساکشن مرکزی

۵ نکته طلایی برای پیشگیری: 🛡️

- تمیز کردن فیلتر هر ۳-۵ روز
- شست و شوی مسیر با شوینده غیرخورنده
- بررسی اورینگ ها در سرویس ماهانه
- استفاده از محافظ برق / UPS

- سرویس دوره‌ای توسط تکنسین متخصص

دریافت مشاوره رایگان 

 فقط کافی‌ست یک عکس یا ویدئو از ساکشن خود ارسال کنید

در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی تخصصی دریافت کنید

[ارسال سریع در واتساپ](#) 

تهیه شده توسط تیم تخصصی باپیری دنتال | اختصاصی برای دندانپزشکان ایران 
www.bapiridental.com 